

乳房治療用器械

Teat operating instruments

Aチューブ (滅菌済)	A tube indwelling teat cannula (silicon rubber)	134
	導乳管N	Milking tube, metal 134
	乳頭切開刀SI式	Teat slitter, SI type 135
	乳房洗浄管	Washing tube 135
	有窓鋭匙	Teat sharp cutter with eye 136
	乳頭鋭匙	Teat sharp cutter 136
	乳頭套管針	Teat trocar 137
	乳頭綿棒	Teat applicator 137
	ペニシリン針	Teat injection cannula for penicillin 138
	乳房治療管	Infusion catheter for teat disease 138
	サブヒール	Teat protection ring Sub-heel 139

一般

Aチューブ (滅菌済)

A tube indwelling teat cannula (silicon rubber)

電子線滅菌、単回使用製品です。


牛の各種乳頭病変の排乳障害(乳頭口狭窄、乳漏)等の治療に使用します。

衛生的で、挿入棒を使用することで容易に挿入ができます。

Sterilized by electron ray. Single use.

To be used for treatment of milking disorder (teat nipple stenosis, milk leakage).

Hygienic. Easy to insert by using insertion stick.

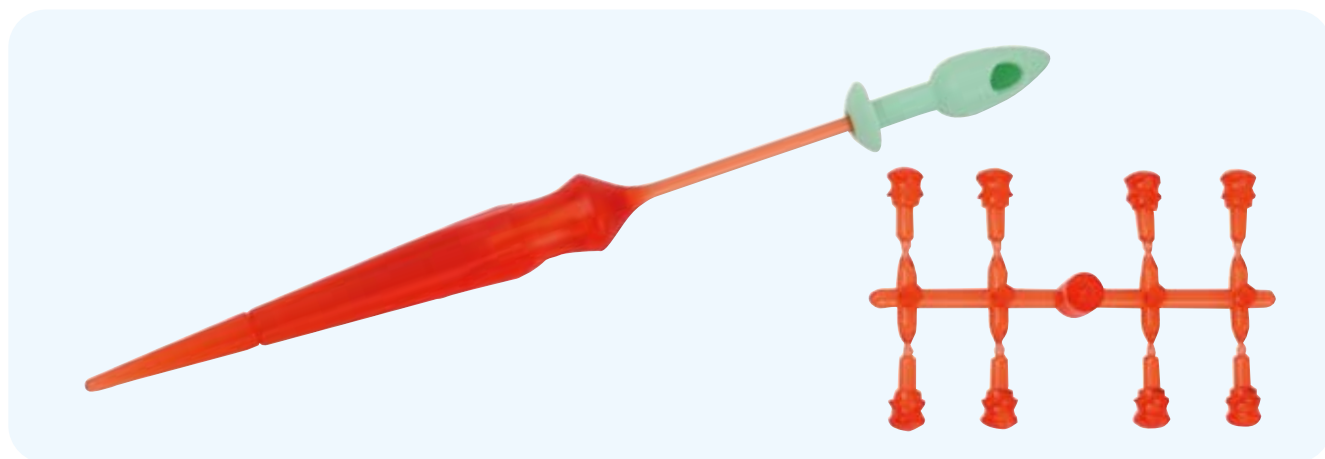

コード番号 Code No.	09019300
製品番号 No.	NFH13
仕様 Spec.	Aチューブ ×1 Aチューブカバー ×1 挿入棒 ×1 差込み栓 ×24付 A tube ×1 A tube cover ×1 Insertion stick ×1 Insertion plug ×24
材質 Material	Aチューブ/シリコンゴム A tube / Silicon rubber

● 差込み栓96入(コード番号:09019110)は製造中止になりました。

一般

導乳管N

Milking tube, metal



牛の各種乳頭病変の排乳障害等の治療に使用します。挿入部先端に孔が2カ所、基部に埋没防止のツバがついています。

For treatment of milking disorder. 2holes provided in the point edge. Brim provided in the bottom to prevent to be buried.


コード番号 Code No.	09012400
製品番号 No.	NFH8
型式 Type	中 Medium
全長 Length	72mm
太さ Thickness	φ3mm
材質 Material	ステンレス SUS

入数:10入1箱

一般

乳頭切開刀SI式

Teat slitter, SI type

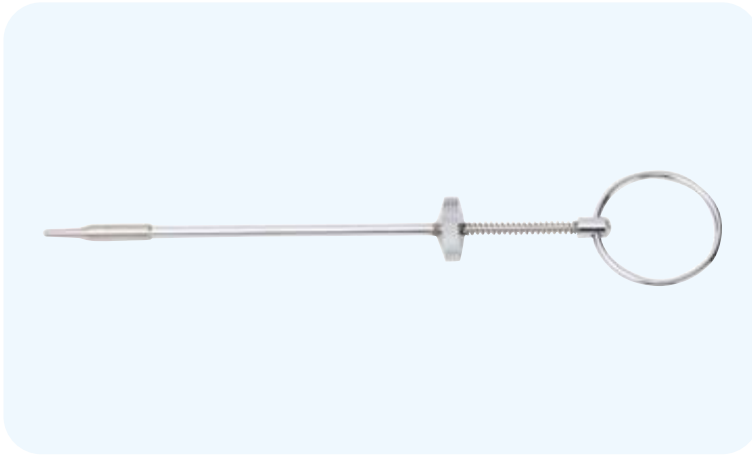

乳頭口、乳頭管の狭窄時に乳頭を容易に切開拡大できます。


To make slit on the nipple in case of stenosis.

コード番号 Code No.	09025000
製品番号 No.	NFH50
全長 Length	140mm
挿入部長 Insert length	90mm
質量 Weight	15g
材質 Material	刃部/ステンレス 本体/黄銅・メッキ Blade/SUS Main part/Brass, plated

一般

乳房洗淨管

Washing tube

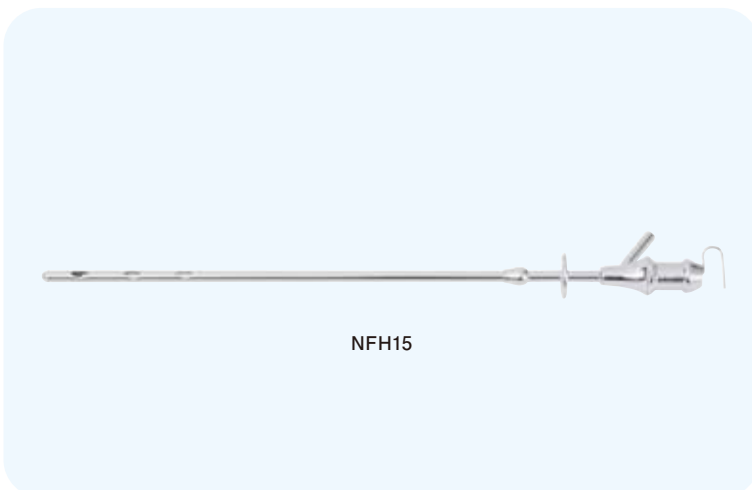

注射筒と接続して、乳頭に洗淨液等を送液して、同時回収することができます。


To be connected to syringe to deliver and collect washing detergent to nipple.

コード番号 Code No.	09020000	09021000
製品番号 No.	NFH15	NFH16
型式 Type	短型 Short type	長型 Long type
太さ Thickness	φ3mm	φ3mm 製造中止
全長 Length	110mm	165mm
挿入部長 Insert length	75mm	130mm
材質 Material	黄銅・メッキ Brass, plated	黄銅・メッキ Brass, plated

一般

有窓鋭匙

Teat sharp cutter with eye

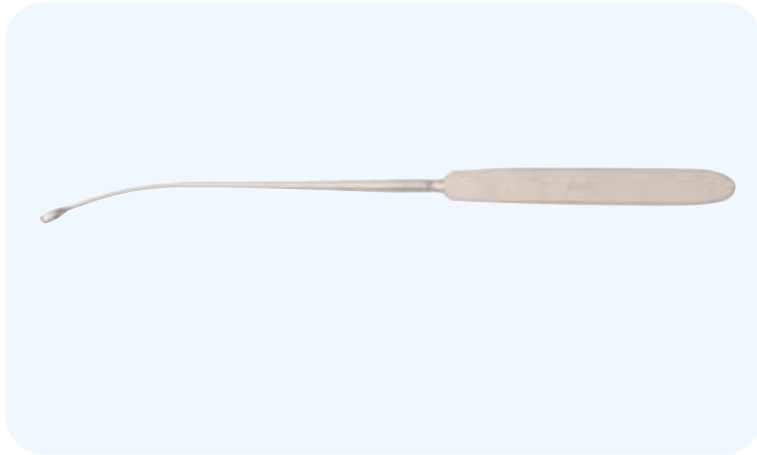

乳管の閉塞時に、乳頭套管針で拡張してから乳口より挿入して内膜の肥厚部、贅生組織を先端刃部で除去します。


In case of lactiferous duct stenosis, enhance the duct with teat trocar, then insert this cutter to remove the thickened tissue.

コード番号 Code No.	09027000
製品番号 No.	NFH55
全長 Length	190mm
挿入部長 Insert length	100mm
質量 Weight	25g
材質 Material	ステンレス SUS

一般

乳頭鋭匙

Teat sharp cutter

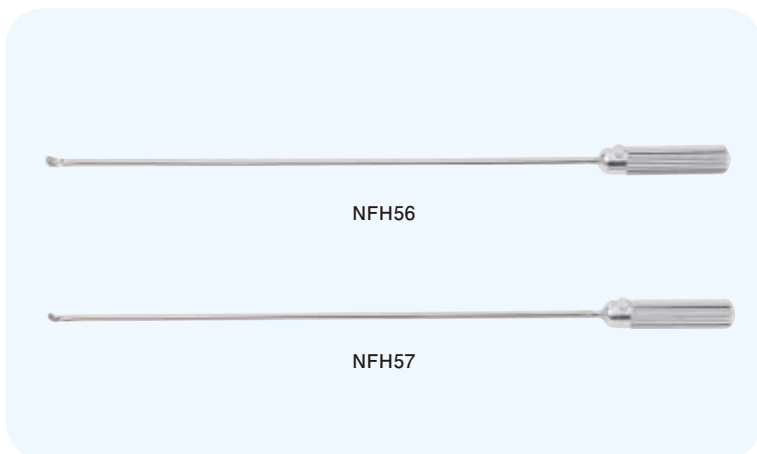

乳口より挿入して、乳槽内の内膜、肥厚部の贅生物を刃部で掻去します。

Insert from teat and remove intramammary thickened tissue.

コード番号 Code No.	09028000	09029000
製品番号 No.	NFH56	NFH57
型式 Type	大 Large	小 Small
全長 Length	160mm	160mm
挿入部長 Insert length	125mm	125mm
先端幅 Tip width	3mm	2.5mm
質量 Weigh	19g	18g
材質 Material	黄銅・メッキ Brass, plated	黄銅・メッキ Brass, plated

一般

乳頭套管針

Teat trocar



乳管内膜が癒着、閉鎖して鋭匙の挿入が困難な場合に、中央部を穿刺して拡張します。

When difficult to insert the cutter due to adhesion of intramammal tissue, pierce and enhance the route.

コード番号 Code No.	09030000
製品番号 No.	NFH60
全長 Length	160mm
挿入部長 Insert length	105mm
質量 Weight	20g
材質 Material	柄/黄銅・メッキ 外筒、穿刺針/ステンレス Grip/Brass, plated Outer cylinder, Needle/SUS

一般

乳頭綿棒

Teat applicator



肥厚部、贅生組織除去後に清拭する器具です。

To be used to clean the teat after removal of thickened tissue.

コード番号 Code No.	09032000
製品番号 No.	NFH66
全長 Length	180mm
挿入部長 Insert length	130mm
質量 Weight	12g

一般

ペニシリン針

Teat injection cannula for penicillin



乳房炎治療用の抗生物質、治療薬液を乳管に注射注入する場合に使用します。


To be used to inject antibiotics for teat treatment.

コード番号 Code No.	09034000
製品番号 No.	NFH71
型式 Type	細 Small 10基 10Base
挿入部長 Insert length	55mm
太さ Thickness	φ2mm
単位 Set	1打
材質 Material	黄銅・メッキ Brass, plated

一般

乳房治療管

Infusion catheter for teat disease

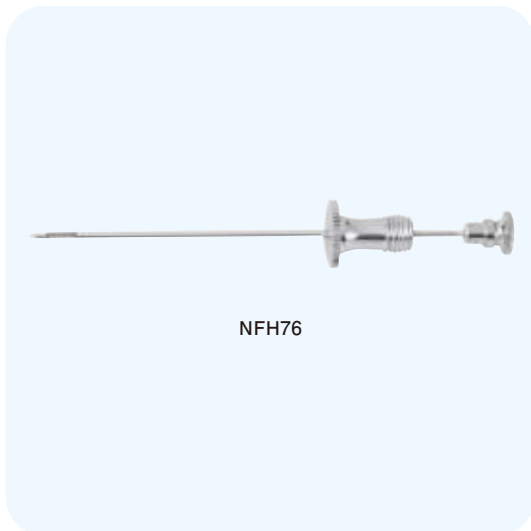

乳頭口の狭窄時、乳漏等に使用します。

常時乳管内に挿入しておき、栓をはずして注射筒に接続し、薬液、油剤等を注入します。

For treatment of lactiferous duct stenosis, milk leakage, etc. All time inserted in the duct for treatment. Remove the cap to inject medicaments through to syringe.

コード番号 Code No.	09035000	09036000
製品番号 No.	NFH75	NFH76
型式 Type	太 Large	細 Small 製造中止
挿入部長 Insert length	60mm	60mm
太さ Thickness	φ3mm	φ2mm
材質 Material	黄銅・メッキ Brass, plated	黄銅・メッキ Brass, plated

● NFH76につきましては、在庫品のみの販売となります。 Until stock run out, for NFH76.

サブヒール

Teat protection ring Sub-heel



装着例

乳牛の乳房踏傷防止のため、左右後脚に取りつけて使用します。

分娩10日前後から分娩2～3ヵ月まで装着することをお勧めします。

For prevention of damaging teat. To be installed in both hind legs. Recommended to use for 2-3months from 10 days after delivery.

コード番号 Code No.	09043000
製品番号 No.	NFH90
外径 Outside φ	φ190mm
内径 Innerside φ	φ80mm
厚さ Thickness	23mm
質量 Weight	1組 約100g 2個1組 1set approx.100g 2pcs/set
材質 Material	ポリウレタン Polyurethane