





## 【特長】

- ・牛口腔の開口状態を保持し、口腔内治療、カテーテル挿入および薬液投与等の処置を安全に行います。
- ・軽量で使いやすい
- ・撮影時の反射を防ぐツヤ消し素材

## 【使用方法】

1. 本品を洗浄、消毒します。
2. 牛は確実に保定してください。
3. 牛を開口させ本品を口腔内に挿入し、大臼歯奥まで押し装着・保持します。
4. 必要な処置を実施します。
5. 処置を実施後、ゆっくり脱着します。
6. 使用後、付着している粘液等が乾燥する前に洗浄します。

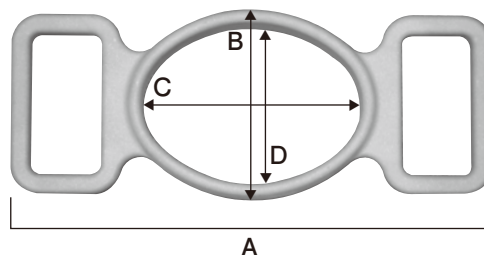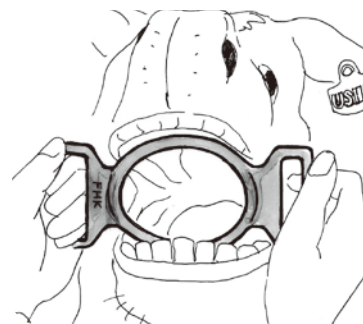

コード番号 Code No.	05003200
サイズ Size	A 240mm/B96mm/C110mm/D80mm
質量 Weight	380g
材質 Material	アルミニウム

## 富士平工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷6丁目11番6号  
TEL(03)3812-2271(代) FAX(03)3812-3663  
URL/http://www.fujihira.co.jp

**FHK**

## 北海道富士平工業株式会社

〒001-0027 札幌市北区北27条西9丁目5番22号  
TEL(011)726-6576(代) FAX(011)717-4406  
帯広支店〒080-0027 帯広市西17条南1丁目15番27号  
TEL(0155)58-1811(代) FAX(0155)58-1815